

APORTAS

DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO

Detergente Enzimático PH Neutro para el lavado de Material Quirúrgico y Endoscopios.

Descripción: El Detergente Enzimático Aportas es un detergente desincrustante líquido concentrado, neutro en base a tensoactivos aniónicos y no iónicos potenciado con enzimas específicas para todo tipo de suciedad.

Aportas Detergente Enzimático está diseñado especialmente para la remoción de suciedad orgánica, grasas, proteínas y carbohidratos, incluidos restos de fluidos biológicos.

El Detergente Enzimático está formulado para la limpieza manual de instrumental medico quirúrgico o en máquina automática para la limpieza de instrumentos endoscopicos, antes de la desinfección y esterilización de materiales de Hospital, Clínicas, Laboratorios, Centros dentales, Veterinarios, etc.

Beneficios

- Ayuda a degradar de mejor forma y más rápido la materia orgánica, mejorando la penetración del detergente en el Instrumental.
- Aumenta la vida útil de los instrumentos.
- Evita el uso de múltiples detergentes.

Instrucciones de Uso:

Aplicar el producto diluido entre 0.3 y 0.5% (3 a 5 cc/Lt. de agua)

Dejar actuar entre 10 a 20 minutos

De ser necesario por nivel de suciedad ejercer acción mecánica con escobilla o esponja sobre las superficies expuestas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Enjuagar con agua corriente o blanda , secar.

Características Físico Químicas

Aspecto : Líquido transparente o levemente turbio, color amarillento, Inodoro.

Peso Específico (20°C): 1.0 – 1.1

PH (20°C): 6.5 – 7.5

Contenido Tensoactivos : 14 – 15 %

Máximo umbral de efectividad enzimática entre 40 y 60 °C

Vencimiento: 2 años .Observar etiqueta. Almacenar a temperatura ambiente no mayor a 30°C, en lugar fresco y seco.

Precauciones

Evite el contacto prolongado de la piel .

Usar medidas de protección apropiadas .

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si hay contacto con los ojos , mucosas, enjuagar con abundante agua fría.

No ingerir, en caso de hacerlo dar a beber agua en cantidad.

Producto NO peligroso.

Presentación

5 litros – 1 litro con sello de inducción (sello de seguridad que garantiza la inviolabilidad del contenido; evita filtración y contaminación del producto por terceros)



Comercial Aportas S.A.
Patricia Viñuela N° 485-G Lampa