

SONDA FOLEY LÁTEX FORRADO EN SILICONA 2 VÍAS

 Canulas,
Sondas y
Tubos


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Sonda Foley látex forrado en silicona 2 vías.
Marca:	Cranberry.
Material:	Látex forrado en silicona.
Color:	Amarillo claro.
Tamaño:	8 tamaños.
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable permite el drenaje de la orina en todo paciente que necesite un cateterismo temporal o permanente. La sonda permite la salida de la orina desde la vejiga al recolector de orina. Para su anclaje en la vejiga posee un balón que se infla con agua destilada estéril y queda flotando dentro de este órgano, este balón se mantiene inflado todo el tiempo al poseer una válvula unidireccional, este anclaje evita la salida accidental de la sonda. La cantidad de agua con la que se infla el balón dependerá de cada tamaño de sonda, detallado en las especificaciones del producto.		
Libre de Látex:	No.	Estéril:	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y limpio. Temperatura de -5 a 50°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Termoplástico:	Sí: ☒ No: ☐	Atraumático:	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐	Flexible:	Sí: ☒ No: ☐	Curvatura natural en la punta de la sonda:	Sí: ☒ No: ☐
- La indicación de instalación de sonda Foley es médica y su ejecución la realiza una enfermera(o). La preparación previa a la instalación incluye un prolijo aseo genital y posterior lubricación de la uretra con vaselina o endogel estéril. - El tamaño de la sonda Foley que se usará, dependerá del tamaño del paciente. En general las sondas 8 y 10 FR, son usadas en pacientes pediátricos. A partir del tamaño 12 FR se usa en paciente adulto. - Esta sonda Foley posee una punta distal con una curvatura natural, se caracteriza por ser redondeada, recta y atraumática. Cuenta con dos orificios laterales distales que drenan la orina dentro de la sonda hasta llegar a la bolsa recolectora. - El balón de la sonda se mantiene inflado todo el tiempo debido a que la conexión distal posee una válvula unidireccional. - Su conexión de drenaje es universal, facilitando su uso con toda bolsa recolectora de orina. - El French (FR) equivale al diámetro interno en milímetros(mm) de la sonda. - Para retirar la sonda, se debe primero drenar el líquido del balón interno de esta, ubicado en su extremo al interior de la vejiga. Para ello coloque una jeringa de 10 ml sin aguja en el acceso del lumen distal, donde previamente había inflado el balón, presione la válvula y aspire suavemente el contenido líquido. - Una vez retirada la sonda Foley, observe que el paciente logre orinar de manera espontánea e informe.					


CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado ISO 13485 – 2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

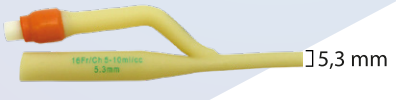ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO							
Código Interno	Largo	Volumen del balón	FR	Peso	Diámetro externo	Descripción Gráfica	Color
AASOFO08	29 cm	3 mL	8 FR	5,7 gr	2,7 mm	 2,7 mm	Negro
AASOFO10	30 cm	3 mL	10 FR	6,8 gr	3,3 mm	 3,3 mm	Gris
AASOFO12	39,6 cm	5 - 10 mL	12 FR	8,7 gr	4 mm	 4 mm	Blanco
AASOFO14	40,1 cm	5 - 10 mL	14 FR	9,7 gr	4,7 mm	 4,7 mm	Verde oscuro
AASOFO16	40 cm	5 - 10 mL	16 FR	11,1 gr	5,3 mm	 5,3 mm	Naranja
AASOFO18	40 cm	5 - 10 mL	18 FR	12,3 gr	6 mm	 6 mm	Rojo
AASOFO20	40 cm	5 - 10 mL	20 FR	14,1 gr	6,7 mm	 6,7 mm	Amarillo
AASOFO22	40 cm	5 - 10 mL	22 FR	14,5 gr	7,3 mm	 7,3 mm	Azul

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

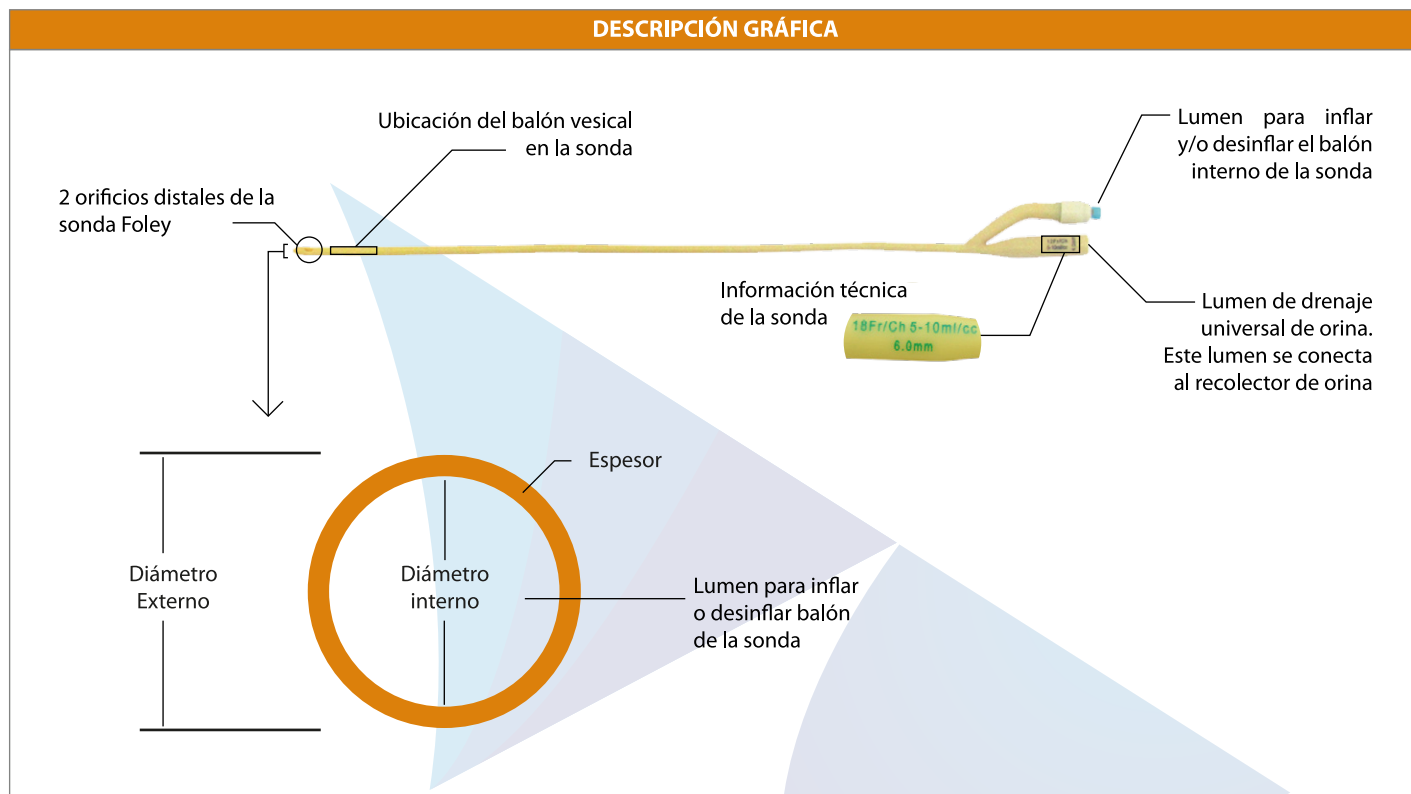

Cranberry®

PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl